
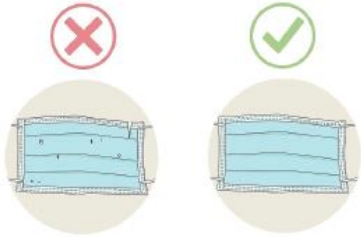

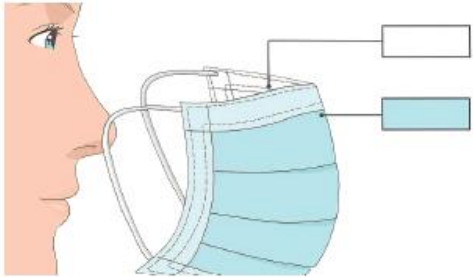

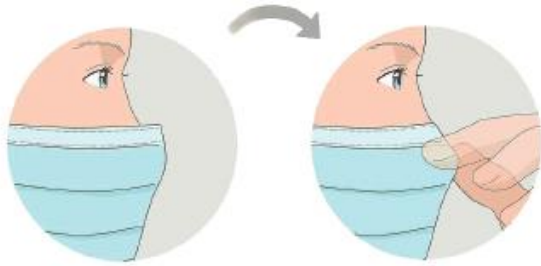
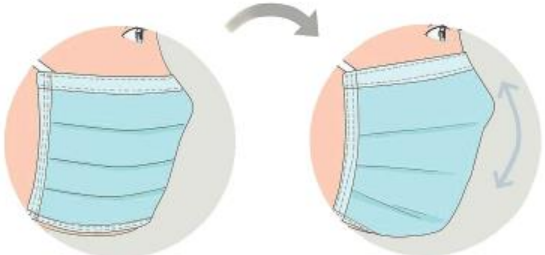


Wegwerp mondkmasker correct OPZETTEN

<p>1. Ontsmet grondig je handen</p> 	<p>2. Controleer het mondkmasker op gebreken</p> 	<p>3. Draai het in de juiste richting</p> 
<p>4. Plaats de juiste kant op het gezicht</p> 		<p>5. Pas het neusstuk aan</p> 
<p>6. Pas het masker aan</p> 	<ul style="list-style-type: none">✓ Het is niet omdat u een masker draagt, dat u volledig beschermd bent. Afstand houden en correcte handhygiëne blijven belangrijk!✓ Raak uw gezicht niet aan als u het masker draagt.✓ Draag het masker maximaal acht uur aan een stuk.✓ Vervang het masker als het vuil, beschadigd of vochtig is.	

Wegwerp mondkmasker correct AFZETTEN

<p>1. Ontsmet grondig je handen</p> 	<p>2. Raak NOOIT de voorkant aan wanneer je het mondkmasker afzet! Gebruik de banden</p> 	<p>3. Werp het masker, na gebruik, bij het <u>restafval</u></p> 
<p>4. Ontsmet je handen opnieuw</p> 	<p>Bron en afbeeldingen: https://fr.wikihow.com/mettre-un-masque-chirurgical. Aanbevelingen aangepast op basis van de aanbevelingen van de Risk Management Group.</p>	